

# PROCÉDURE DU CONTRÔLE PAR GOUTTES DE SANG SÉCHÉ

L'athlète choisit une trousse Tasso et une trousse de sécurité InnoVero pour le contrôle par gouttes de sang séché. Il ouvre les deux trousse, puis en retire les articles suivants :

- Dispositif Tasso M20
- Trousse de sécurité
- Sceau de sécurité
- Lingette désinfectante à base d'alcool
- Pansement
- Sac de protection (en aluminium)

1



2

L'athlète se lave les mains, puis réchauffe la partie supérieure du bras destiné au prélèvement. En frottant vigoureusement la zone, on améliore la circulation sanguine, ce qui facilite la collecte de sang.

À l'aide de la lingette désinfectante à base d'alcool, l'athlète nettoie ensuite le site de ponction.

3

Après avoir retiré les pellicules de protection du Tasso M20, l'athlète applique le dispositif sur son bras.

La base adhésive assure une bonne tenue sur la peau. Les quatre capsules de collecte doivent se trouver sous le dispositif.



Pour commencer le prélèvement sanguin, l'athlète appuie sur le bouton rouge du dispositif et le maintient enfoncé pendant deux secondes, jusqu'à ce qu'un clic se produise. Une légère piqûre se fera alors sentir.

Les capsules de collecte deviennent rouges à mesure que le sang s'y accumule; les quatre doivent être remplies. Le dispositif doit rester en place au moins une minute, et au plus dix minutes. La durée moyenne de la collecte est de trois à cinq minutes.

4



5

Une fois les quatre capsules remplies, l'agent de contrôle du dopage (ACD) demande à l'athlète de retirer le dispositif. L'athlète le décolle délicatement de son bras, puis le dépose sur la table.

Il nettoie ensuite le site de ponction avec une lingette désinfectante à base d'alcool avant d'y appliquer un pansement.



6

Pour sceller l'échantillon, l'athlète ouvre la trousse de sécurité InnoVero pour le contrôle par gouttes de sang séché, en veillant à garder la protection en mousse noire sur le dessus. La cartouche en plastique contenant les quatre capsules de collecte est placée dans le compartiment supérieur rainuré. En maintenant la cartouche avec un doigt, l'athlète appuie sur le dispositif de l'autre main pour le détacher. Il transfère ensuite la cartouche dans le compartiment inférieur du boîtier.

7

L'athlète retire d'abord le film transparent, puis la protection en mousse noire pour permettre au couvercle de se refermer hermétiquement avec un déclic.

Il appose ensuite le sceau de sécurité autocollant sur l'étui, en recouvrant la jointure sous l'étiquette A/B.



8

Enfin, l'athlète insère le boîtier de sécurité scellé et le dispositif Tasso utilisé dans le sac en aluminium, puis remet le sachet dans la boîte de la trousse, qu'il scelle en vue de l'expédition.

L'ACD et l'athlète remplissent ensemble les documents requis.

